

# Rotomir – le miroir aspirant qui se nettoie par rotation

ROTOMIR, C'EST À LA FOIS UN MIROIR DENTAIRE ET UN ASPIRATEUR. Le fait de combiner deux instruments obligatoires laisse de la place dans la bouche, assure une bonne ergonomie, non sans améliorer le bien-être du patient. Comme c'est le dentiste seul qui gère cet instrument, l'assistante dentaire peut se concentrer à améliorer la capacité de l'équipe. Une fonction de rotation à haut régime, brevetée, maintient le miroir du Rotomir propre et sa visibilité nette. Rotomir ouvre une ère nouvelle dans votre cabinet dentaire – à bien des points de vue.



## UNE INVENTION BIENVENUE

L'aspiration à vide est nécessaire lors des traitements des dentistes et des hygiénistes dentaires. Lors de l'utilisation de la fraise ou du détartreur à ultrasons, il faut aspirer l'eau de refroidissement, la salive, les copeaux, la vapeur de mercure et les gaz toxiques. Mais cela exige une part inutilement importante du travail de l'équipe dentaire. C'est pourquoi Stefan Gunnarsson, dentiste à Karlskrona, Suède, a élaboré un instrument unique, rapidement adopté, par les dentistes ont. Rotomir est maintenant d'une grande utilité dans le travail quotidien de nombreux dentistes et hygiénistes dentaires.

## MOINS D'INSTRUMENTS

Le fait de combiner le miroir et l'aspiration réduit le nombre d'instruments présents dans la bouche. C'est plus agréable pour le patient et l'espace de travail est beaucoup plus grand. Cet instrument ouvre de nouveaux horizons au dentiste, il lui offre l'autonomie et une évolution dans sa manière de réaliser les traitements.

## PLUS DE POSSIBILITÉS

Rotomir offre au dentiste l'aspiration et le miroir – sans assistance. Cela élimine une tâche exigeante et permet à l'assistante dentaire de prendre une plus responsabilité pour augmenter l'efficacité de l'équipe dentaire. Rotomir fait gagner du temps et libère des mains, ce qui crée des moyens et des possibilités d'améliorer les finances du cabinet dentaire.

## UN TRAVAIL PLUS CONFORTABLE

Rotomir préserve votre poignet et maintient de manière confortable la langue, la joue et la lèvre. Une meilleure ergonomie procure un traitement plus sûr. L'assistante ne fatigue plus son dos, puisqu'elle n'a plus besoin d'aspirer pendant le fraisage et le patient peut être traité en position semi-assise.

# rotomir



**AUTONETTOYANT – PAR LA FORCE CENTRIFUGE**

Un miroir dentaire reçoit toujours l’eau de refroidissement de la fraise ou du détartreur à ultrasons. Le miroir rotatif Rotomir est autonettoyant. La force centrifuge emporte l’eau, tout en l’aspirant. La turbine entraînée par le courant d’air de l’aspiration à vide produit une rotation de 12.000 tours/minute environ.

**AMÉLIORE L’HYGIÈNE DE VOTRE CABINET**


Rotomir est très facile à démonter et à nettoyer. Toutes ses pièces supportent l’autoclave.

**UNE ASPIRATION UNIVERSELLE D’EMPLOI FACILE**

Rotomir est une aspiration universelle de faible niveau sonore, d’emploi facile et utilisable avec tous les dispositifs d’aspiration habituels. Il se branche directement sur l’adaptateur de l’unité de succion. Rotomir a été testé, approuvé et pourvu du marquage CE par l’Institut national suédois d’essai des Matériaux et de Recherche, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.



*La société suédoise Mirrodent AB fabrique et commercialise des instruments dentaires qui combinent de manière optimale les fonctions de visibilité et d’aspiration et qui ont été brevetés.*

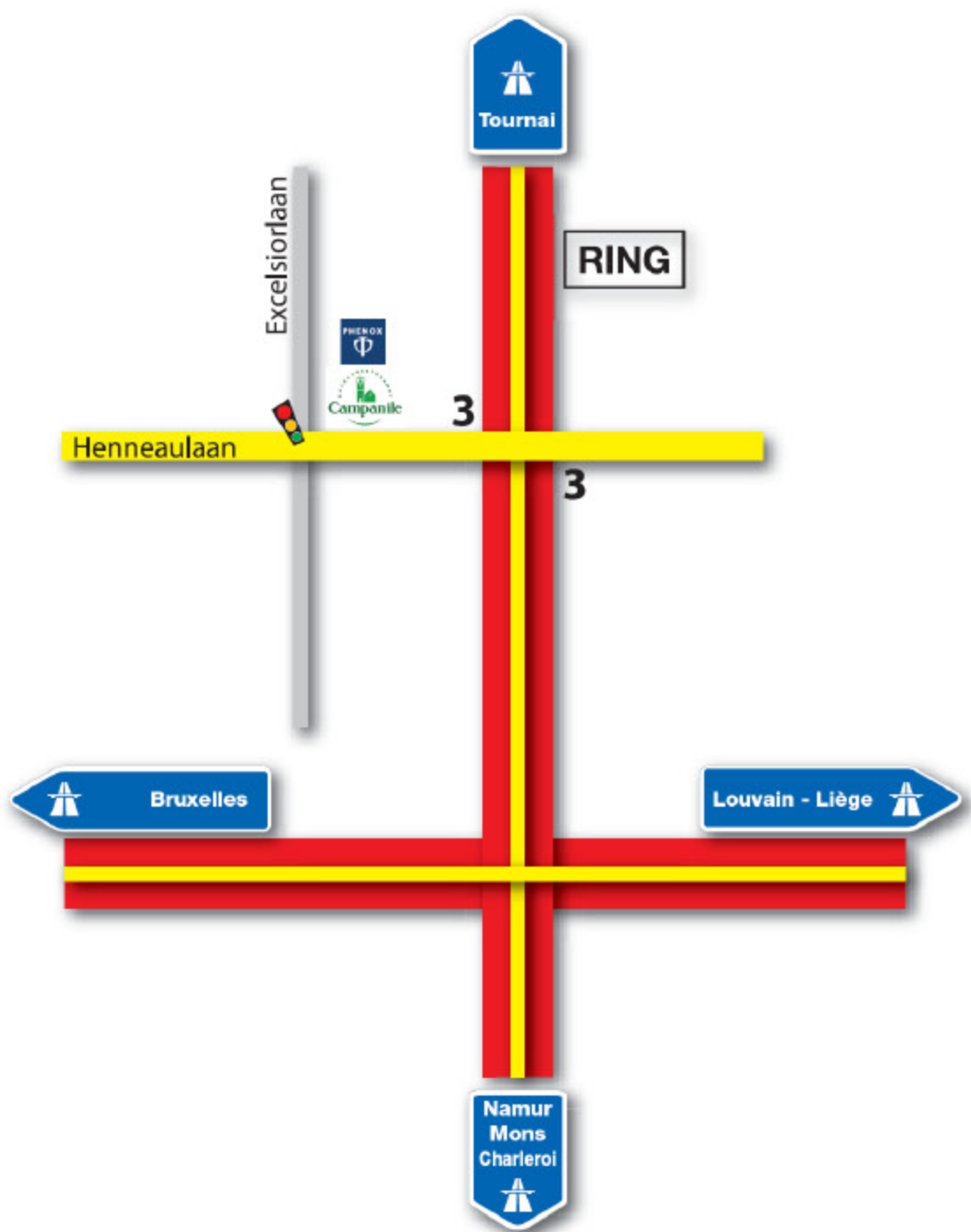

Coffret 3 instruments  
489 € **promo : 439 € + TVA**

**rotomir**



optimize your **dental office**

Excelsiorlaan 4A • 1930 Zaventem • T +32 2 721 5054 • F +32 2 721 5024 • info@phenox.be • www.phenox.be